

7. Гарантийное обслуживание

Наименование: Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 5

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Производитель: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко. Лтд.», Китай,
ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd. NO.3. factory, Xingdingmao Industry
Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.

Импортер в России: ООО «Реамед»

Адрес: 394026 г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону:
8-800-500-14-14

Дата продажи	Подпись продавца/Поставщика
	М.П.



Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 5



Инструкция по эксплуатации



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации

1. Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 5 предназначен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Стул изготовлен из прочной стали, имеет высококачественное, антикоррозийное покрытие. Является санитарно-гигиеническим приспособлением.

2. Меры предосторожности



- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах


3. Эксплуатация

1. Перед первой эксплуатацией рекомендуем воспользоваться сторонней помощью.
2. Разложите раму. Внимательно осмотрите стул, убедитесь в целостности соединительных узлов. Установите ножки.
4. Установите стульчак и санитарное ведро.
3. Отрегулируйте высоту ножек. Для этого необходимо сжать фиксатор и переустановить опору на нужный уровень (рис.1). Когда фиксатор попадет в пазы, опора зафиксируется. Все опоры должны быть отрегулированы симметрично.



рис.1

4. Стул компактно складывается (рис.3). Чтобы сложить конструкцию, необходимо снять распорку и стульчак (рис.2 поз. А), затем последовательно сложить опоры по направлению друг к другу (рис. 2 поз. В).

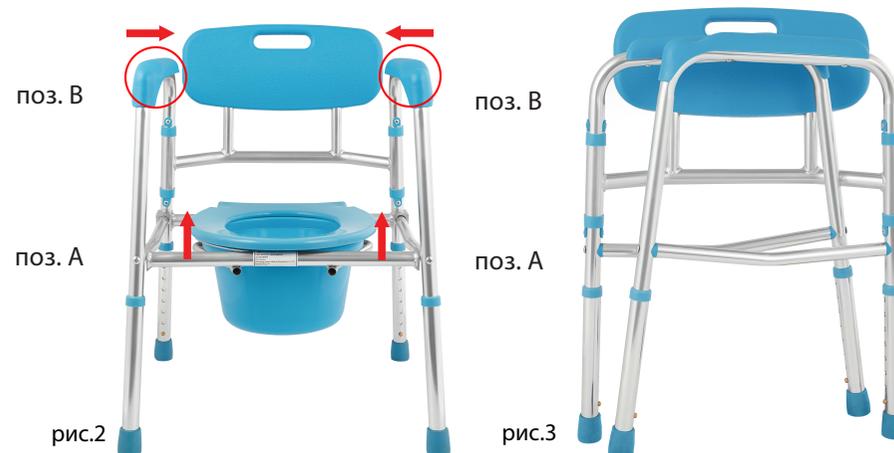

4. Хранение и уход

- Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
- Стульчак, и санитарное ведро необходимо дезинфицировать хлоро- и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами.
- Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений.
- Конструкция компактно складывается, поэтому не занимает много места.

5. Упаковка и комплектация

Кресло-стул Ortonica TU5 поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит:

- Кресло-стул Ortonica TU 5 - 1 шт.;
- Санитарное ведро - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

6. Основные технические характеристики

Длина	550 мм
Ширина	570/590/610/670/720 мм
Высота	730-830 мм
Высота от пола до сиденья	455/480/505/550/610 мм
Масса (ширина сиденья 55; 61 см)	4,4 /4,6 кг
Грузоподъемность (ширина сиденья 55; 61 см)	130/180 кг