



Инструкция по эксплуатации

TU 233

Назначение

Насадка на унитаз Ortonica TU 233 предназначена для использования в туалетных комнатах.

Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте ortonica.ru

Указания по технике безопасности

Рекомендуем перед началом использования насадки промыть ее теплой водой с мыльным раствором

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Распаковка и сборка

Насадка на унитаз упакована в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Изделие не требует сборки, так как поставляется в собранном виде.

Эксплуатация насадки на унитаз

Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

Установка

Установите насадку на унитаз. Фиксация насадки осуществляется за счет крепления вовнутрь унитаза на один болт в распор.

Гарантийный талон

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Насадка на унитаз Ortonica TU 233

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Производитель: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко. Лтд.», Китай, ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd. NO.3. factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.

Импортер в России: ООО «Медрус»

Адрес: 394026 г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: 8 800 500 14 14



8 800 500 14 14
www.ortonica.ru